



KN-1071 NARCOBIT-E(Ⅱ型) 修理・点検のための製品送付方法について

平素は当該製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。修理・点検の為に製品をお送りいただく際には、下記の事項を必ずお読みいただき、お送りくださいますようお願いいたします。

<梱包方法>

輸送中の破損を防止するため、下記①・②をお守りいただき、機器の周囲を緩衝材で十分に保護して梱包してください。運送途中の製品破損については、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

①麻酔薬を必ず抜いてください

気化器内部の麻酔薬は最後まで排出し、濃度設定ダイヤルをOFFにしてください。

輸送中に気化器から麻酔薬が漏れ出ますと、製品(エアーポンプ等)の破損や思わぬ事故を引き起こす可能性があります。



②麻酔装置を寝かせて梱包してください

麻酔装置は電源スイッチが上側に来よう横に寝かせて、その周囲に緩衝材で十分に保護して梱包してください。

立てた状態での梱包や、梱包材が不足している場合は、輸送中に架台部が破損する事例が発生しています。

梱包後、麻酔装置が動かないことを確認してください。

またコンセントは取り外してください。電源コードを取付けたまま寝かせた場合は、断線する可能性があります。

電源スイッチを上側にして寝かせてください。

電源コードを同梱する場合には、コードを梱包材で包み、麻酔装置の上に置いてください。

上部にも緩衝剤を詰めこんでください。



(株)夏目製作所本社または大阪SSCの修理受付係宛にお送りください。



<送付先>

下記住所の東京本社または大阪SSCの修理受付係宛にお送りください。

送り状には「精密機器在中」と明記しお送りいただくと、破損の危険性が少なくなります。

お送りいただく際の運送料は、お客様負担にてお願い致します。修理完了品の返送は弊社元払いとさせていただきます。



株式会社 夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>

東京本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6

TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1

TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178

V3-2501

