






KN-920 ハンマー (打診器) Percussor

このハンマー（打診器）は、腱反射の診断に用いるものです。

ハンマーのヘッドは、シリコンゴム製リング状で重く、柄に使用したナイロンが適度に
しなるため、ヘッドに加速度がついて速い叩打ができます。



そのため神経の専門医でなくても反射が出やすく、しかも反射にムラが少ない
（反射性筋活動電位の振幅が大きく、そのバラツキも少ない）とされています。

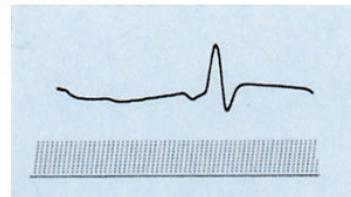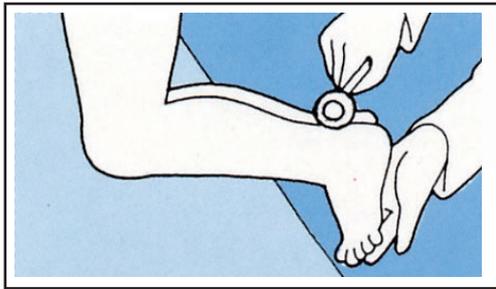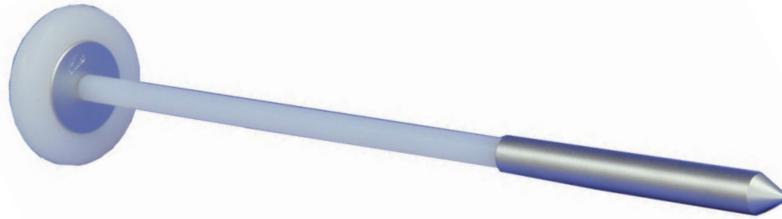

アキレス腱反射

【使用方法】

ハンマーは、柄を長く持ち、手首の関節が支点になるように軽く振ってください。
ヘッドが重いので、力を入れなくても強く叩けます。

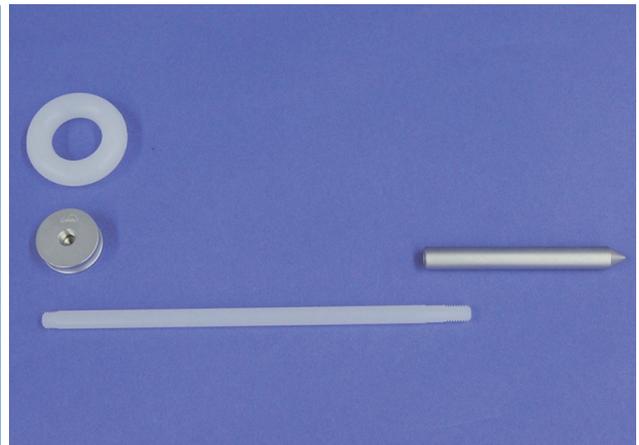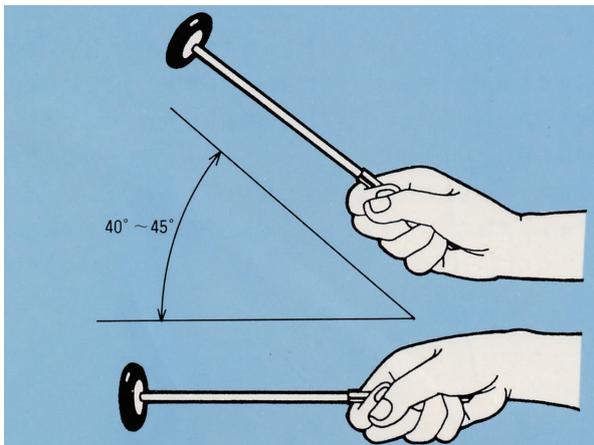

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1403

株式会社 夏目製作所
NAUME

本社
〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社
〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300