




## KN-913-1000 ユーリンバッグ 1000

### 自宅での採尿に最適！

ユーリンバッグには、ポリアンプル及びラベルがセットされておりますので、病医院はもとより自宅での蓄尿にもご利用いただけます。  
1500ml以上の容量があり、100ml毎に目盛り入りです。(氏名等記入欄入りになりました。)



バッグ 蓄尿袋

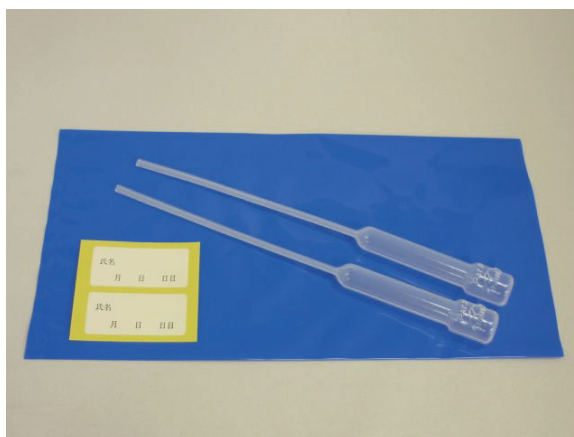

青袋入り (ポリアンプル：2本、ラベル)

### 【特徴・応用】

#### 1. 長時間の蓄尿ができる

ユーリンバッグには 1500ml の容量があります。

#### 2. 架台（ラック）なしに蓄尿ができる

ユーリンバッグはスタンド型バッグになっており、内容（尿）を入れるにつれて安定し、架台は特に必要ありません。

#### 3. 尿中物質の測定用バックとして応用できる


単位時間あたりの尿中物質の排泄量を測定する検査の場合、ユーリンバッグを用いますと、計量目盛がありますので一定量まで水を入れると直接、尿量を測る必要がなくなり便利です。

# KN-913-1000 ユーリンバッグ 1000

## 使用に際してのご注意


### 1. 氏名などの記入

ユーリンバッグに尿をためる前にまず  
所定のところへ氏名・年令・採尿月日を、  
ボールペンで記入してください。

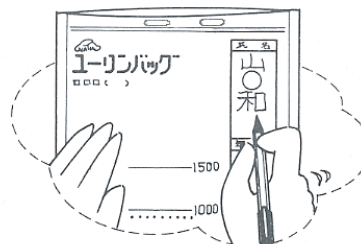

### 2. バッグの点検

氏名などの記入がすみしたら、バッグの底の部分を  
手で押し広げ半分ほど（1,000ml）水を入れて、水の  
もれがないかどうかを確かめてください。  
この際、チャックが完全にしまるかどうかもためして  
ください。

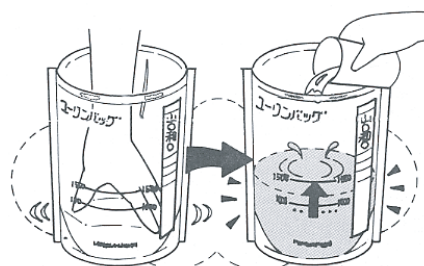

水もれがないことがわかりましたら水を捨て、バッグをさかさまにして水切りしてください。



### 3. 尿のため方

直接バッグに排尿してもかまいませんが、  
できれば紙コップなどの適当な容器にいったん  
尿をとり、それをバッグに移しかえてください。



### 4. バッグの置き方

バッグは直接床へ置いてください。  
上端の穴は釘などへ吊り下げるための  
ものではありません。  
転倒防止用のみにご利用ください。

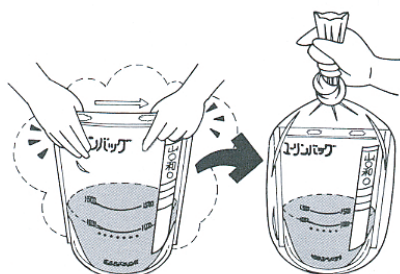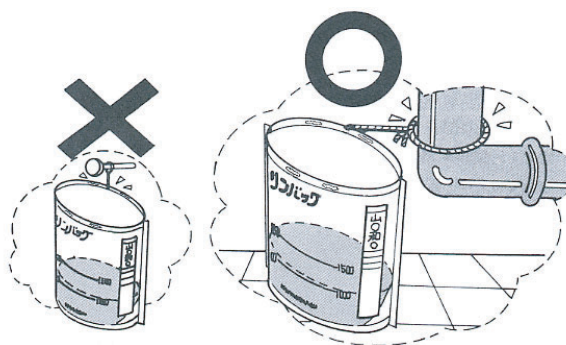

### ★ 持ち運び方

尿を全部そのまま病院へ持参する場合は、  
チャックをきちんとしめ、さらにビニール袋で  
おってから持ち運んでください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2107

本社

〒113-8551  
東京都文京区湯島2-18-6  
TEL : 03-3813-3251  
FAX : 03-3815-2002

大阪支社

〒561-0811  
大阪府豊中市若竹町1-9-1  
TEL : 06-6398-7177  
FAX : 06-6398-7178



## KN-913-3000 ユーリンバッグ 3000


### 自宅での採尿に最適！

ユーリンバッグには、ポリアンプル及びラベルがセットされておりますので、病医院はもとより自宅での蓄尿にもご利用いただけます。

100ml毎に3000ml迄目盛り入りです。(氏名等記入欄入りになりました。)



バッグ 蓄尿袋

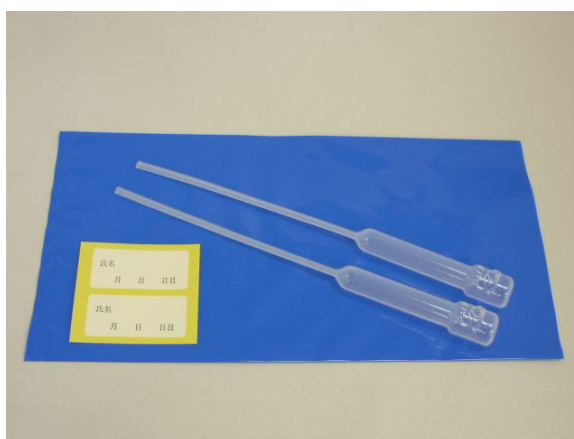

青袋入り (ポリアンプル：2本、ラベル)

### 【特徴・応用】

#### 1. 長時間の蓄尿ができる

ユーリンバッグには 3000ml の容量があります。

#### 2. 架台（ラック）なしに蓄尿ができる

ユーリンバッグはスタンド型バッグになっており、内容（尿）を入れるにつれて安定し、架台は特に必要ありません。

#### 3. 尿中物質の測定用バックとして応用できる


単位時間あたりの尿中物質の排泄量を測定する検査の場合、ユーリンバッグを用いますと、計量目盛がありますので一定量まで水を入れると直接、尿量を測る必要がなくなり便利です。

# KN-913-3000 ユーリンバッグ 3000

## 使用に際してのご注意


### 1. 氏名などの記入

ユーリンバッグに尿をためる前にまず  
所定のところへ氏名・年令・採尿月日を、  
ボールペンで記入してください。

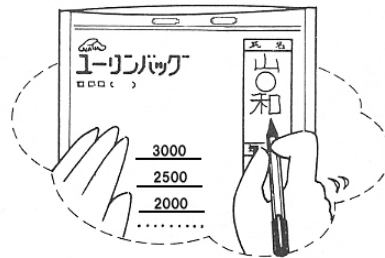

### 2. バッグの点検

氏名などの記入がすみしたら、バッグの底の部分を手で押し広げ半分ほど（1,500ml）水を入れて、水のもれがないかどうかを確かめてください。  
この際、チャックが完全にしまるかどうかもためてください。

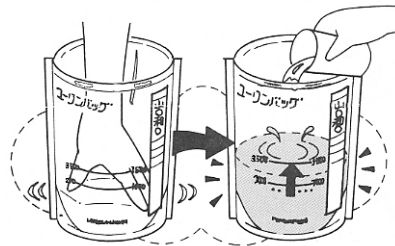

水もれがないことがわかりましたら水を捨て、バッグをさかさまにして水切りしてください。



### 3. 尿のため方

直接バッグに排尿してもかまいませんが、  
できれば紙コップなどの適当な容器にいったん  
尿をとり、それをバッグに移しかえてください。



### 4. バッグの置き方

バッグは直接床へ置いてください。  
上端の穴は釘などへ吊り下げるときの  
ものではありません。  
転倒防止用のみにご利用ください。

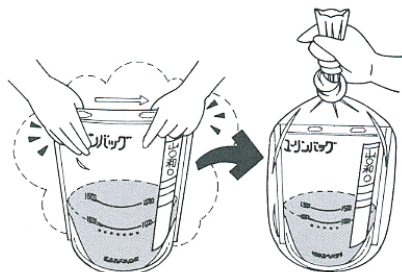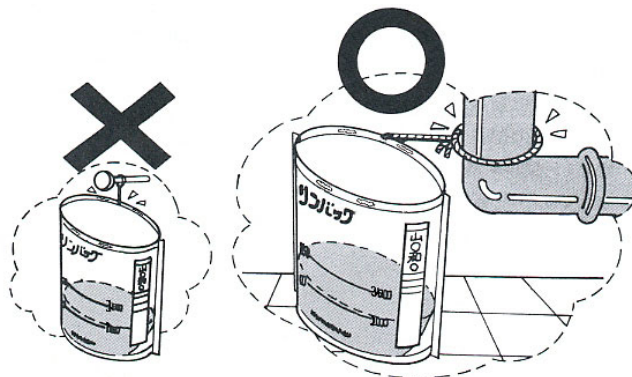

### ★ 持ち運び方

尿を全部そのまま病院へ持参する場合は、  
チャックをきちんとしめ、さらにビニール袋で  
覆ってから持ち運んでください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2107








# KN-920 ハンマー（打診器） Percussor

このハンマー（打診器）は、腱反射の診断に用いるものです。

ハンマーのヘッドは、シリコンゴム製リング状で重く、柄に使用したナイロンが適度にしなるため、ヘッドに加速度がついて速い叩打ができます。



そのため神経の専門医でなくても反射が出やすく、しかも反射にムラが少ない（反射性筋活動電位の振幅が大きく、そのバラツキも少ない）とされています。

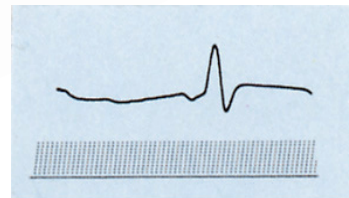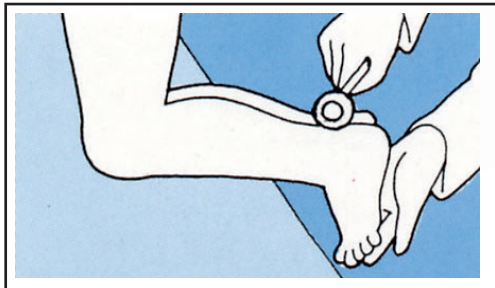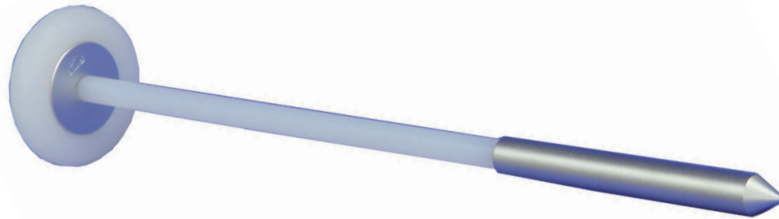

アキレス腱反射

## 【使用方法】

ハンマーは、柄を長く持ち、手首の関節が支点になるように軽く振ってください。  
ヘッドが重いので、力を入れなくても強く叩けます。

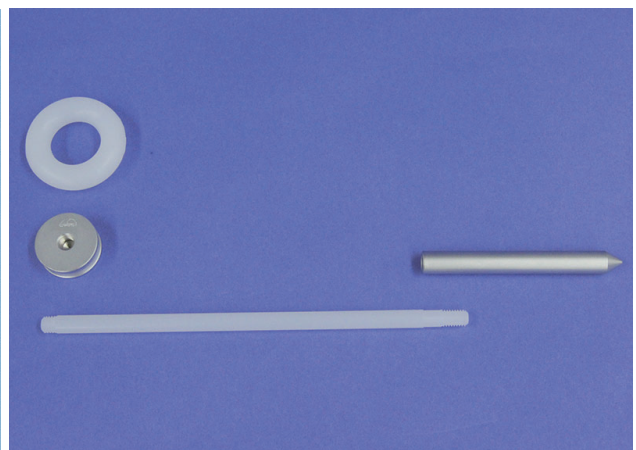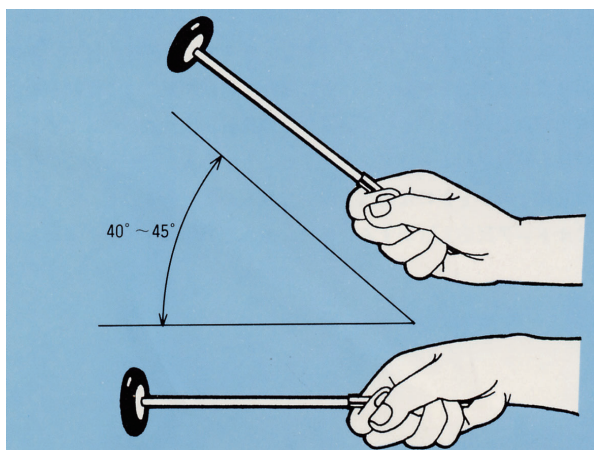

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2107